

Zgoda na leczenie aparatem ortodontycznym VinciSmile

Państwa lekarz ortodonta zalecił zastosowanie niewidocznego aparatu ortodontycznego VinciSmile; personel medyczny dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Państwu najlepsze możliwe leczenie.

Aby zapewnić prawidłowy przebieg terapii ortodontycznej z użyciem nakładek przezroczystych, przed rozpoczęciem leczenia należy mieć świadomość, że choć leczenie ortodontyczne może przyczynić się do uzyskania zdrowego i pewnego uśmiechu, każde leczenie ortodontyczne — w tym leczenie niewidocznym aparatem ortodontycznym VinciSmile — ma swoje ograniczenia oraz wiąże się z potencjalnym ryzykiem.

Pragniemy przekazać Państwu uporządkowane informacje dotyczące leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem nakładek VinciSmile:

I. Informacje o systemie ortodontycznym VinciSmile

System ortodontyczny VinciSmile stanowi serię przezroczystych, aktywnych nakładek korygujących wykonanych z medycznych materiałów polimerowych. Trójwymiarowy plan leczenia, opracowany przy użyciu technologii komputerowych, umożliwia przeprowadzenie terapii ortodontycznej poprzez stopniowe i kontrolowane przemieszczanie zębów.

Plan leczenia przygotowywany jest w oparciu o zaawansowane oprogramowanie graficzne i technologię obrazowania, w połączeniu z diagnozą oraz zaleceniami lekarza ortodonta. Po zatwierdzeniu planu przez lekarza wykonywana jest indywidualna seria nakładek ortodontycznych VinciSmile, które będą stosowane kolejno, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

II. Ryzyka oraz kwestie wymagające szczególnej uwagi

1. Prawidłowa współpraca pacjenta jest kluczowym warunkiem powodzenia leczenia. Poza czynnościami takimi jak jedzenie, picie czy szczotkowanie zębów, nakładki należy nosić przez co najmniej 20 godzin na dobę. Należy mieć świadomość, że w przypadku niestosowania się do zaleceń lekarza dotyczących czasu noszenia nakładek lub niestawiania się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach, leczenie może ulec wydłużeniu lub nie przynieść oczekiwanych rezultatów.
2. W początkowej fazie terapii, zarówno przy pierwszym założeniu nakładek, jak i przy każdej kolejnej ich wymianie, mogą wystąpić typowe reakcje ortodontyczne, takie jak niewielki ból, uczucie rozchwiania zębów czy przejściowe osłabienie siły żucia. Objawy te zwykle ustępują samoistnie w ciągu 3–4 dni. W przypadku wystąpienia silnego, narastającego lub utrzymującego się dyskomfortu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
3. Noszenie nakładek może powodować otarcia lub podrażnienia dziąseł, błony śluzowej policzków, warg oraz innych tkanek miękkich jamy ustnej.
4. Podczas użytkowania nakładek może wystąpić tymczasowa suchość w jamie ustnej lub zwiększone wydzielanie śliny. Objawy te mają charakter przejściowy i zwykle nie wymagają interwencji.
5. Niewidoczny aparat ortodontyczny VinciSmile nie umożliwia przemieszczania mostów protetycznych ani implantów stomatologicznych.
6. W przypadku zębów, które przez dłuższy czas pozostawały stłoczone, po ich wyrównaniu może wystąpić tzw. „czarna trójkąt”, czyli niewielka przestrzeń pomiędzy zębami w okolicy szyjek.
7. Nakładki VinciSmile są wykonane z materiałów polimerowych; u niektórych pacjentów może wystąpić reakcja alergiczna na ich składniki.
8. Zęby, które nie są objęte aparatem albo są nim objęte tylko częściowo podczas leczenia, mogą w trakcie leczenia nadmiernie wyrzynać się (ekstruzja).
9. Zęby po przebytych urazach mogą reagować nasileniem wcześniejszych objawów. Istniejące wypełnienia lub uzupełnienia protetyczne mogą w trakcie leczenia ulec poluzowaniu i wymagać ponownego osadzenia lub wymiany.
10. W wyniku leczenia może dojść do uszkodzenia lub pogorszenia stanu kości wyrostka zębodołowego oraz tkanek dziąsłowych.
11. W zależności od potrzeb leczenia ortodontycznego lekarz może przykleić na powierzchni zębów niewielkie wypustki (attachmenty), które wspomagają ruch zębów lub zwiększają retencję nakładek. Elementy te zostaną usunięte po zakończeniu leczenia.

12. W celu uzyskania odpowiedniej przestrzeni niezbędnej do prawidłowego ustawienia zębów, podczas leczenia może być konieczne wykonanie zabiegu IPR (Interproximal Reduction), polegającego na minimalnym, kontrolowanym zeszlifowaniu szkliwa w wybranych miejscach.

13. W przypadku złożonych wad zgryzu może zaistnieć potrzeba zastosowania dodatkowych metod wspomagających leczenie ortodontyczne, takich jak przyciski, wyciągi elastyczne, łuki segmentowe czy miniimplanty kotwiące.

14. W niektórych sytuacjach plan leczenia lub projekt nakładek może wymagać modyfikacji bądź dodania kolejnych etapów. Jeżeli będzie to konieczne, lekarz może również zdecydować o zastosowaniu tradycyjnego aparatu stałego w celu dokończenia leczenia.

15. Ogólnie przyjmuje się, że leczenie ortodontyczne nie powoduje ani nie zapobiega występowaniu zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ). Jeśli przed rozpoczęciem terapii występują objawy takie jak trzaski, ból lub dysfunkcja stawu, należy omówić z lekarzem możliwe konsekwencje leczenia.

16. W trakcie leczenia ortodontycznego może wystąpić resorpcja korzeni zębów w różnym stopniu - jest to zjawisko, którego nie da się w pełni kontrolować, nawet przy prawidłowo prowadzonym leczeniu.

17. Po zakończeniu leczenia ortodontycznego może dojść do nawrotowego przesunięcia zębów (recydywy). W celu utrzymania osiągniętego efektu konieczne jest noszenie aparatu retencyjnego przez okres od 1 do 2 lat, a u niektórych pacjentów dłużej, a nawet dożywotnio, zgodnie z zaleceniami lekarza.

18. Każda para nakładek oraz jej opakowanie są oznaczone numerem seryjnym. Nakładki należy stosować w ściśle ustalonej kolejności oraz regularnie zgłaszać się na wizyty kontrolne. Przerwa w leczeniu trwająca dłużej niż 3 miesiące, bez uzasadnionej przyczyny, będzie traktowana jako rezygnacja z leczenia, a wszelkie konsekwencje wynikające z przerwania terapii ponosi pacjent.

19. W przypadku konieczności zmiany planu leczenia lub uszkodzenia bądź utraty nakładki z winy pacjenta mogą zostać naliczone dodatkowe koszty.

20. Pacjent zobowiązany jest do przechowywania co najmniej trzech poprzednich zestawów nakładek, w oryginalnych opakowaniach i zgodnie z ich numeracją. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub niemożności założenia aktualnej nakładki należy użyć poprzedniego zestawu w celu utrzymania bieżącego efektu leczenia lub, jeśli to konieczne, zakładać wcześniejsze nakładki w odpowiedniej kolejności.

III. Świadoma zgoda na leczenie

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się w pełni z powyższymi informacjami dotyczącymi leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem niewidocznego aparatu ortodontycznego VinciSmile oraz że rozumiem zarówno korzyści, jak i ryzyka związane z podjęciem tego leczenia, jak również mam świadomość możliwości rezygnacji z leczenia ortodontycznego.

Wiem, że leczenie ortodontyczne nie jest nauką ścisłą, a uzyskane rezultaty mogą się różnić w zależności od indywidualnych uwarunkowań pacjenta. Zarówno mój lekarz ortodonta, jak i firma VinciSmile, nie udzielają gwarancji ani zapewnienia co do ostatecznego wyniku leczenia. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem systemu VinciSmile, zgodnie z planem leczenia ustalonym przez mojego lekarza ortodontę. Udzielam również zgody mojemu lekarzowi ortodonczie oraz firmie VinciSmile na wykorzystywanie mojej dokumentacji medycznej w celach dydaktycznych, badawczych oraz w analizie procesu leczenia ortodontycznego. Zgoda ta obejmuje w szczególności, lecz nie wyłącznie: raporty z badań, wyciski stomatologiczne, projekty leczenia, fotografie oraz zdjęcia rentgenowskie.

Podpis pacjenta:

Data:

Podpis opiekuna prawnego:

Data:

Lekarz prowadzący: